

International patents pending. All imitations will be prosecuted.
Vizmaxx® is a registered EU trade mark

VIZMAXX Autofocus®



Made in China / Fabricado en China / Fabriqué en Chine
Hergestellt in China / Made in Cina
Fabricado en China / Vervaardigd in China



Industex S.L.
Avenida de los Países Catalanes, 34 8ª Planta
08950 Esplugas de Llobregat
Barcelona



Shanghai Industex RO
Room 517, 1438 Shanxi Rd,
Shanghai, China



INDUSTEX
Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta
08950 Esplugas de Llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00

VENTEO
17 rue de la Garenne
95310 SAINT-LOUEN-LAUMONE
FRANCE
venteo@venteo.fr
www.venteo.fr
(+33) 1 34258551

ISL
ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano - Italia
www.isl-italy.com
industex@industex.com

BEST DIRECT
PO Box 202, Spit Junction NSW
2088, Australia
Best Direct (International) Benelux B.V.
28, 3871 MM
The Netherlands

Best Direct International Ltd,
Asiakaspalvelu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundtjänst - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se

ISL
ISL GmbH
Osteestr. 3
D 26131 Oldenburg Germany
www.isldeutschland.com
+49 (0) 441 95 07 08-0

Version n° - 4
4/11/20

• ČEŠTINA •

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Brýle Vizmaxx Autofocus® nejsou určeny jako náhrada korekčních brýlí předepsaných vaším očním lékařem, ani by neměly nahrazovat pravidelné oční prohlídky. Nechte si pravidelně vyšetřovat zrak očním lékařem, abyste si zajistili dobré vidění.

Oční vyšetření může odhalit zdravotní problémy, které nemají žádné příznaky ani symptomy. Nechte si pravidelně kontrolovat oči.

Nikdy nezanedbávejte nebo neodkládejte odbornou radu o očním zdraví kvůli nákupu, obdržení nebo používání přípravku Vizmaxx Autofocus®.

Nedívejte se přímo do slunce. Pohled do slunce nebo do jeho blízkosti způsobí okamžité a nevratné poškození vašich očí.

K čištění zařízení Vizmaxx Autofocus® **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani přípravky obsahující alkohol.

Stejně jako u každé multifokální čočky bude oko potřebovat určitou dobu na adaptaci a dosažení optimálního vidění.



Nevhodné pro řízení

Sada obsahuje:

1 pár brýlí Vizmaxx Autofocus®

1 sáček z mikrovlákna

1 návod k použití

POUŽITÍ

Brýle Vizmaxx Autofocus jsou vhodné pro zlepšení vidění na blízko a na střední vzdálenost. Čočky brýlí Vizmaxx Autofocus® jsou multifokální a poskytují korekci v rozsahu 0,5 až 2,75 dioptrií. Díky multifokálním čočkám nemusíte brýle neustále měnit. Jednoduše si nastavíte bod vidění podle svých potřeb korekce. Pro optimální vidění se jednoduše podívejte přes čočku do bodu, který vidíte nejjasněji.

ČIŠTĚNÍ

Aby nedošlo k poškrábání čoček, doporučujeme brýle nejprve omýt vodou z vodovodu.

Poté brýle Vizmaxx Autofocus® vyčistěte hadříkem z mikrovlákna a speciálním čistícím prostředkem na čočky. Jako hadřík na čištění čoček lze použít i sáček z mikrovlákna, který jste obdrželi s brýlemi Vizmaxx Autofocus®.

ÚDRŽBA

Doporučujeme brýle nasazovat a sundávat opatrně a oběma rukama, aby nedošlo k ohnutí obrouček. Rovněž nedoporučujeme pokládat si brýle na hlavu, protože by mohlo dojít k deformaci obrouček.

Intenzivní teplo může rovněž zkreslit obroučky, proto doporučujeme nenechávat brýle na palubní desce nebo na sedadle v autě.

Abyste předešli poškrábání čoček, vždy brýle pokládejte na rovný povrch čočkami nahoru, aby se čočky nedostaly do kontaktu s žádným povrchem.

POUZE AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

Na tento výrobek se vztahují určité spotřebitelské záruky. Ty jsou předepsány australským spotřebitelským zákonem a novozélandským zákonem o spotřebitelských zárukách z roku 1993, které poskytují ochranu spotřebitelům. Na tento výrobek se v Austrálii ani na Novém Zélandu nevztahuje žádná výslovná záruka. Výše uvedený odstavec se vztahuje na ostatní země.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady v rámci lhůt stanovených právními předpisy platnými v jednotlivých zemích.



ISO 7000-1641 Operativní instrukce